

LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 3 del 02/11/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • EMOCOLTURA • LIQUIDI CAVITARI • LIQUOR 	<p>FLACONI DEDICATI PER AEROBI E ANAEROBI</p>		<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVARE E TRASPORTARE I CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE • COMPILARE MD-LAB-MB-01 • PER IL LIQUOR È NECESSARIO INVIARE ANCHE IL VETRINO
<ul style="list-style-type: none"> • TAMPONI URETRALI • TAMPONI CERVICALI • TAMPONI VAGINALI • TAMPONI VULVARI (ricerca germi comuni) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 TAMPONI SOTTILI PER LA SEDE URETRALE CON TERRENO AMIES/LIQUIDO DI TRASPORTO • 2 TAMPONI SPESSI PER LA SEDE CERVICALE/ VAGINALE/ VULVARE CON TERRENO AMIES DI TRASPORTO 		<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVARE E TRASPORTARE I CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C) • COMPILARE MD-LAB-MB-02 • PER I TAMPONI CERVICALI, VAGINALI È NECESSARIO INVIARE ANCHE IL VETRINO

LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 3 del 02/11/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • TAMPONE FARINGEO • NASALE • AURICOLARE • OCULARE • LINGUALE • GENGIVALE • CUTANEO • RETTALE • FERITE E COLTURALI GENERICI 	<p>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES/LIQUIDO</p>		<ul style="list-style-type: none"> • TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C) • PER I TAMPONI CUTANEI COMPILARE IL MODULO MD-LAB-MB-03 (OBBLIGATORIO)
<ul style="list-style-type: none"> • TAMPONE PER RICERCA MYCOPLASMA E UREAPLASMA • TAMPONE PER RICERCA NEISSERIAE 	<p>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES/LIQUIDO</p>		<ul style="list-style-type: none"> • TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)

LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 3 del 02/11/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • RICERCA (RAPIDA) • STREPTOCOCCO GR. A (Str. Pyogenes) • RICERCA ANTIGENE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 	TAMPONE SECCO (SENZA TERRENO DI TRASPORTO)		<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)
<ul style="list-style-type: none"> • LIQUIDO SEMINALE COLTURALE • LIQUIDO SEMINALE PER SPERMIOGRAMMA • ESPETTORATO 	CONTENITORE STERILE		<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C) • PER SPERMIOGRAMMA CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE
FRAMMENTI UNGUEALI, CAPELLI E SCAGLIE CUTANEE	CONTENITORE STERILE		<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE • COMPILARE IL MODULO MD-LAB-MB-03 (OBBLIGATORIO)

LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 3 del 02/11/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
RACCOLTA FECI: <ul style="list-style-type: none"> • COPROCOLTURA • E. COLI (O:157) • YERSINIA ENT. • ANTIGENI VIRALI • TOSSINA E ANTIGENE CLOSTRIDIUM DIFFICILE • FECI COMPLETO • RICERCA LIEVITI 	CONTENITORE CON PALETTA		<ul style="list-style-type: none"> • TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)
SANGUE OCCULTO	CONTENITORE CON PALETTA		<ul style="list-style-type: none"> • TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)
FECI per RICERCA PARASSITI E LORO UOVA	CONTENITORE DEDICATO CON LIQUIDO FISSATIVO E CONSERVANTE		<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE