







LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 03 del 01/06/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • EMOCROMO • VES • RETICOLOCITI • TEST DI COOMBS DIRETTO • ASSETTI EMOGLOBINICI • EMOGLOBINA GLICATA • SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE • TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE (eccetto HIV, HCV e HBV) • TEST DI GENETICA MOLECOLARE 	<p>TAPPO LILLA 13x75 da 4,0 mL (sangue intero K2EDTA)</p> <p>CODICE: BD - 368861</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2°C-8°C)</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASMA CONGELATO PER ACTH, ALDOSTERONE, AMMONIO, CATECOLAMINE PLASMATICHE, RENINA E VITAMINA B6. - SANGUE INTERO CONGELATO PER VITAMINA B1 E B2.
<ul style="list-style-type: none"> • RICERCA HBV-DNA, HCV-RNA • GENOTIPIZZAZIONE VIRUS EPATITE C • RICERCA HIV-RNA 	<p>TAPPO BIANCO MADREPERLA 13x100 da 5,0 mL (K2 EDTA, con GEL separatore)</p> <p>CODICE: BD – 362795 oppure 362791</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2°C-8°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM PER SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER CONSEGNE SUCCESSIVE ALLE 16/24 ORE DAL PRELIEVO</u></p>



LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 03 del 01/06/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • TEST COAGULAZIONE SEMPLICE • TEST COAGULAZIONE SPECIALE • D-DIMERO • FATTORI COAGULATIVI 	<p>TAPPO CELESTE 13x75 da 2,7 mL (Plasma Sodio Citrato)</p> <p>CODICE: BD - 364305</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10 A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2°C-8°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 15 A 4000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER COAGULAZIONE SPECIALE E D-DIMERO</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • CHIMICA CLINICA • IMMUNOMETRIA • SIEROIMMUNOLOGIA SU ROCHE COBAS • ALLERGOLOGIA • ELETTROFORESI • IMMUNOELETTROFORESI • CDT • FARMACI • VITAMINE A, E 	<p>TAPPO GIALLO ROSSA 13x100 da 5 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD - 367955</p>		<p>RDI e ADERENTI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3500 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>SIERO CONGELATO PER VITAMINA A, VITAMINA E</u></p>

LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 03 del 01/06/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • CURVE DA CARICO DI GLUCOSIO • GLICEMIE POST PRANDIALI • TUTTE LE GLICEMIE CHE NON POSSONO ESSERE CONSEGNATE IN GIORNATA IN RDI • ACIDO LATTICO 	<p style="text-align: center;">TAPPO GRIGIO CHIARO</p> <p style="text-align: center;">13x75 da 2,0 mL (Stabilizzante Fluoro ossalato)</p> <p style="text-align: center;">CODICE: BD-368920</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER ACIDO LATTICO</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • ESAMI DI TOSSICOLOGIA • EMOGAS/BICARBONATI/CARBOSSI • EMOGLOBINA/METAEMOGLOBINA • ESAMI SU PLASMA CHE RDI INVIA IN SERVICE 	<p style="text-align: center;">TAPPO VERDE SCURO</p> <p style="text-align: center;">13x75 da 4,0 mL (Litio eparina)</p> <p style="text-align: center;">CODICE: BD - 368884</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM <u>SOLO PER ALLUMINIO, COBALTO E VITAMINA C</u></p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>EMOGAS: A TEMPERATURA REFRIGERATA</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA <u>SOLO PER ALLUMINIO, COBALTO, ZINCO E VITAMINA C;</u> CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER VITAMINA C</u></p>

LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 03 del 01/06/2022)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> ESAMI DI CITO-GENETICA 	<p style="text-align: center;">TAPPO VERDE SCURO 13x100 da 6,0 mL (Sodio eparina)</p> <p>CODICE: BD - 367876</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p>
<ul style="list-style-type: none"> QUANTIFERON 	<p style="text-align: center;">TAPPI GRIGIO, VERDE, GIALLO, VIOLA 13x75 da 1,0 mL (sangue intero)</p> <p>SET per Quantiferon</p> <p>COD: BD - 622526</p>		<p>RDI: TERMOSTATAZIONE 24 h. A 37°C; CENTRIFUGAZIONE PER 15' A 4000 RPM</p> <p>ADERENTI/SERVICE: riempire categoricamente le provette fino al segno nero.</p> <p>Miscelare le provette per inversione 10 volte assicurandosi che l'intera superficie interna delle provette sia ricoperta di sangue in modo che gli antigeni presenti sulle pareti reagiscano.</p> <p>Le provette devono essere conservate, in posizione verticale, a temperatura ambiente ed inviate in RDI entro 16 ore dal prelievo.</p>

Istruzioni per l'uso:

Le etichette devono essere applicate sulle provette in posizione verticale, riportando il numero del codice a barre rivolto in basso.